

弱酸性次亜塩素酸とナノ洗浄のダブルパワーで **細菌やウイルスを素早く除去!**

約8300万個の芽胞に対して、**10秒で99.99%の除去率!**

(公的第三者検査機関調べ)



ティッシュ等にナノクイックを含ませ、  
レンズ表面を含む本体をまるごと除菌できます!  
またレーベのゴーグル部分や眼鏡には直接スプレーし、  
拭き取り もしくは 水洗を行ってください。



浸漬洗浄ができないルーベや  
マイクロのレンズを痛めることなく、  
簡単に除菌や洗浄ができないかな?



◆400cc (スプレータイプ)  
商品コード: 19301 標準価格: 2,900円

## OTHER LINEUP



◆50cc (携帯用) ◆1000cc (詰め替え用)  
商品コード: 19300 商品コード: 19302  
標準価格: 1,500円 標準価格: 4,500円

◆4000cc (詰め替え用)  
商品コード: 19303  
標準価格: 17,000円

今まで除菌・洗浄が難しかった様々なアイテムにお使いいただけます!



### デンチャー・印象物・マウスガード

気泡の防止  
感染防止  
濡れの改善



### 白衣・院内着

脱色せずに  
血液などを  
洗浄します



### 訪問診療時のインスツルメント・開口器など

往診先での  
診療器具の  
除菌・洗浄に



### 无影灯カバー・スピットン・ユニット周辺

臭いが気になりやすい  
スピットン部の消臭や  
无影灯のプラスチック  
カバーなどの除菌に



### タービン・ハンドピース

こまめな洗浄が困難な  
タービンやハンドピース、  
ワークテーブルを素早く  
除菌します



商品の詳しい使用方法を示した  
「Q&A資料」がございます。  
是非、ご請求ください!

主成分:  
次亜塩素酸 約0.02%  
非イオン界面活性剤 0.05%以下  
(\*原液でご使用ください)

- ◆**双眼ルーベ**  
流水・浸漬洗浄不可のルーベは、本剤を一度ティッシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。  
※ゴーグル部や眼鏡などには直接スプレーが可能です。但しスプレー後は水洗またはティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- ◆**印象物**  
口腔内から採取した印象物を水洗後、本剤でまんべんなくスプレー噴射し、約1分放置後、軽く水洗し、石膏を注入する。  
※印象材により石膏注入の時間などが異なる場合がありますので、必ず各メーカーの指示に従ってください。  
※本剤は口腔内では使用できません。
- ◆**訪問診療用の器具**  
本剤を直接スプレーしティッシュペーパー等で拭き取るか、本剤をティッシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。
- ◆**血液が付着した白衣など** ◆**マウスガード・リテーナー** ◆**スピットン** ◆**ユニット** ◆**シンクなど** ◆**ワックスパターンのクリーナーとして**

<ご注文・価格のお問合せは>

<販売元>

歯科用インスツルメント  
株式会社 **タスク**

〒112-0001  
東京都文京区白山 2-38-14 白山CTビル 5F  
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837