

## メスホルダー セーフティ



ワンタッチでメス刃がとりはずせるメスホルダー  
メス刃に触れずにリムーブでき、**感染防止にGood!**



標準価格：¥18,000 CODE:30569  
医療機器届出番号 09B2X00010Y00054 一般医療機器・ナゾドック  
※写真のメス刃は付属しておりません

- ✔ メス刃除去時のケガや感染防止に
- ✔ 握りやすく安定感のあるグリップ
- ✔ 3パーツに分解可能で清掃性に優れています

### ●使用方法●



ブッシュトリガーの突起部に指をかけます。



作業部のメス刃方向へトリガーをスライドさせます。



メス刃が押し上げられ、ワンタッチで脱落します。

### ●分解図● 3ピースに分解することができ、洗浄・清掃がしやすい構造です。



メス刃装着部位（ヘッド部）

バネ内蔵のブッシュトリガー

ハンドル部

※パーツの別売りはありません

インスツルメントの浸漬洗浄/超音波洗浄には、  
『タスククリーン』 歯科用タンパク分解・防錆洗浄剤  
をおすすめします！



標準価格：¥5,800  
内容量：500g  
CODE:19200

<お問い合わせ>

歯科用インスツルメント 〒112-0001  
株式会社 **タスク** 東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F  
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

<製造販売元>

株式会社 **シオダ** 〒321-0517  
栃木県那須烏山市東原 53

<http://www.task-inc.net>

新製品のご紹介・カタログのダウンロード、  
お得なセール情報などは、ホームページで！

