

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

## フラミンゴ C

### 【形状・構造及び原理等】



材質:アルミニウム、ステンレス鋼、PP、ジュラコン

### 【使用目的又は効果】

歯科用咬合器

### 【使用方法等】

- 1) インサイザルポールを中心に固定し使用する場合は、柱にあるセントリックを上に押し上げ、サイドバーがしっかり入ったことを確認し、固定ツマミを締める。
- 2) また、固定ツマミを緩め、セントリックを下げると上顎フレームは自由運動することが可能。
- 3) 上記1)の状態でも左右へ無理な力を加えますと故障の原因となるため、注意すること。
- 4) 模型の固定には、専用メタルプレートを使用する。

■ 詳細は取扱説明書を参照してください。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ① 本品は、湿度が高くない場所にて保管・管理する。  
[錆を防ぐため]

#### 【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損などのおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- ① 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ② 使用前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ  
電話番号 0287-88-2288