


今まで除菌・洗浄が難しかった様々なアイテムにお使いいただけます！

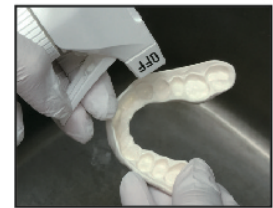

デンチャー・印象物・マウスガード

気泡の防止
感染防止
濡れの改善



白衣・院内着

脱色せずに
血液などを
洗浄します



訪問診療時のインスツルメント・開口器など

往診先での
診療器具の
除菌・洗浄に



無影灯カバー・スピットン・ユニット周辺

臭いが気になりやすい
スピットン部の消臭や
無影灯のプラスチック
カバーなどの除菌に



タービン・ハンドピース

こまめな洗浄が困難な
タービンやハンドピース、
ワークテーブルを素早く
除菌します



商品の詳しい使用方法を示した
「Q&A資料」がございます。
是非、ご請求ください！

主成分：
次亜塩素酸 約 0.02%
非イオン界面活性剤 0.05% 以下
(※原液でご使用ください)

◆双眼ルーベ

流水・浸漬洗浄不可のルーベは、本剤を一度ティシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。
※ゴーグル部や眼鏡などには直接スプレーが可能です。但しスプレー後は水洗またはティシュペーパーなどで拭き取ってください。

◆印象物

口腔内から採取した印象物を水洗後、本剤でまんべんなくスプレー噴射し、約1分放置後、軽く水洗し、石膏を注入する。
※印象材により石膏注入の時間などが異なる場合がありますので、必ず各メーカーの指示に従ってください。
※本剤は口腔内では使用できません。

◆訪問診療用の器具

本剤を直接スプレーしティシュペーパー等で拭き取るか、本剤をティシュペーパーに含ませてから拭き取ってください。

◆血液が付着した白衣など ◆マウスガード・リテーナー ◆スピットン ◆ユニット ◆シンクなど ◆ワックスパターンのクリーナーとして

<ご注文・価格のお問合せは>

<販売元>

歯科用インスツルメント
株式会社 **タスク**

〒112-0001
東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837